

FLÄCHEN-
DESINFIZIENSMITTEL

Fugaten®-Spray (Lysoform®-Spray)


Gebrauchsfertige Sprühdeseinfektion auf Alkoholbasis
zur Schnell-Desinfektion für Flächen, Gegenstände
und Medizinprodukte

Désinfectant en spray à base d'alcool pour
des petites surfaces, objets et dispositifs
médicaux. Prêt à l'emploi.



CE 0482

Fugaten-Spray

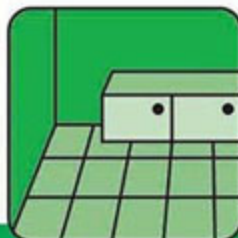

اسپری ضد عفونی کننده الکلی، جهت ضد عفونی سریع تجهیزات پزشکی سطوح کوچک و غیر قابل دسترس و اشیاء

ترکیبات:

هر ۱۰۰ گرم محلول حاوی ۷۰ گرم اتانول دنا توره

طیف اثر:

ضد باکتریها شامل Tb، قارچها، ویروسهای پوشش دار (HBV/HCV/HIV), Rota Virus , Adeno Virus

ویژگیها:

- آماده مصرف
- دارای اثر سریع ماندگار ضد میکروبی
- برای ضد عفونی سریع اشیاء، سطوح کوچک و سطوح غیر قابل دسترس
- مناسب برای ضد عفونی یونیت دندان پزشکی، چراغ سیالیتیک، صندلی معاینه و ...
- تاثیر گذاری و خشک شدن سریع بعد از اسپری شدن بر روی سطوح
- دارای قدرت مرطوب کنندگی بالا
- دارای بوی مطبوع
- ثبت شده در لیست VAH کشور آلمان

طریقه مصرف:

آماده مصرف میباشد.
محلول را از فاصله ۳۰ سانتیمتر بر روی سطح و اشیاء (حداکثر با ابعاد ۲ متر مربع) اسپری کنید تا کاملا مرطوب شود.
(حداکثر ۵۰ سیسی بر متر مربع)





هشدارها/انبارداری:

- به شدت قابل اشتعال است.
- بر روی حرارت و شعله آتش پاشیده نشود.
- در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نشود. (در محلی با تهویه مناسب نگهداری شود).
- دور از دسترس کودکان باشد.
- به زمان انقضاء دقت شود و پس از آن به هیچ عنوان مصرف نشود.
- در صورت استنشاق و بلعیدن ممکن است تأثیر غیر قابل جبران داشته باشد.
- در صورت تماس با چشم بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو دهید و سپس به پزشک مراجعه فرمایید.
- در صورت داشتن احساس ناراحتی بر روی پوست در هنگام استفاده از محلول، به پزشک مراجعه نمایید. (در صورت امکان برچسب محلول را به پزشک ارائه دهید).



سایزها و استانداردهای بسته بندی:

- ۱۰×۵۰۰ CC بطری به همراه سری اسپری
- ۱۲×۱۰۰۰ CC بطری به همراه سری اسپری



طیف اثر	غلظت	زمان تماس
ضد عفونی سطوح بیمارستان و جراحی		۱ دقیقه
آلودگی‌های ویروسی شامل HBV/HCV/HIV Rota Virus , Adeno Virus		۳۰ ثانیه
Virucidal		۱۵ دقیقه

شرکت تجهیزات پزشکی ماهان طب

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، کوچه رامین، پلاک ۱۶ واحد ۲۰

تلفن: ۰۲۱-۲۶۶۴۵۲۸۱ و ۸۴ فکس: ۰۲۱-۲۲۲۷۴۷۰۳
www.MahanMedical.com info@MahanMedical.com