




# PP-SPLINT

آتل آماده پلی اورتان

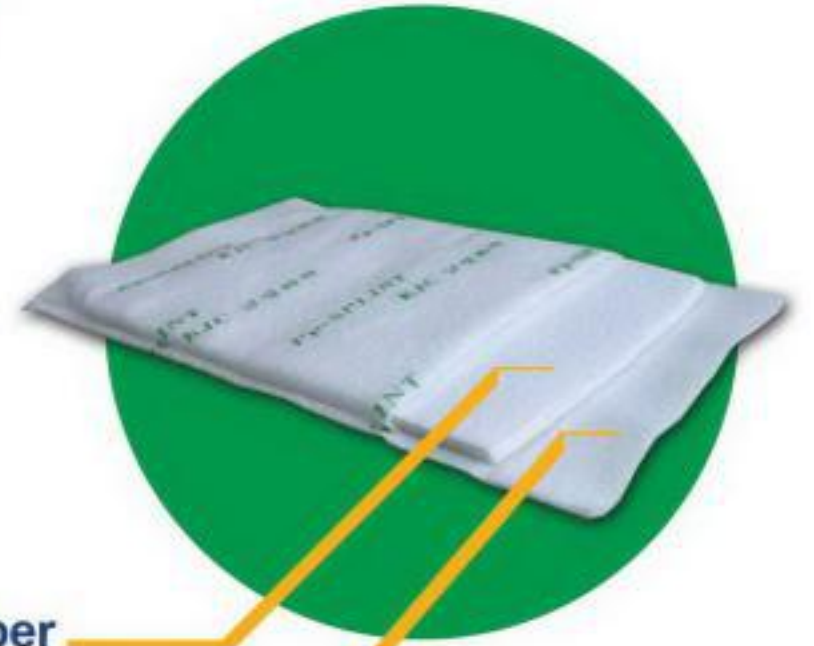

Polyurethane Resin + Polyester Fiber

Webril

ماهان طب عاملیت رسمی توزیع **KJC** کره جنوبی

# KJC

MADE IN KOREA  
KEUMJEONG CHEMICAL CO., LTD



## روش استفاده از آتل آماده Pp-splint

۱. ابتدا سایز مناسب را جهت ناحیه آسیب دیده انتخاب کرده سپس بسته بندی آلومینیومی را باز نمایید. (در آتل های سایزبندی شده و همچنین آتل های رولی طول آتل با برش بوسیله قیچی قابل تغییر است).
۲. آتل را از جلد آن خارج نموده و به مدت ۵ ثانیه داخل ظرف آب ولرم بین (۲۳ تا ۲۵ درجه سانتی گراد) فرو برده تا مرطوب شود. پس از خارج نموده آتل دو یا سه بار آن را بین دو دست فشار دهید تا آب اضافی خارج گردد.
۳. **Pp-splint** را با حوله یا دستمال مناسب خشک نمایید.
۴. لایه ضخیم تر آتل را روی عضو آسیب دیده قرار داده و بوسیله باند (ترجیحاً باند کشی) آن را محکم ببندید تا به راحتی فرم مورد نظر ایجاد شود. آتل پلی اورتان **KJC** پس از گذشت ۲ الی ۴ دقیقه خشک خواهد شد. نکته: هرچه دمای آب افزایش یابد زمان خشک شدن آتل کاهش می یابد.



### SIZE

CODE NO.	SIZE (cm x cm)	PACKAGE	The Injured Part
K8-301-015	2" x 10" (5x25)	10 EA x BOX	Short Arm
K8-305-015	3" x 12" (7.5x30)	10 EA x BOX	Short Arm
K8-310-015	3" x 35" (7.5x90)	5 EA x BOX	Hip Spica
K8-312-015	4" x 15" (10x40)	10 EA x BOX	Short Arm
K8-314-015	4" x 30" (10x76)	5 EA x BOX	Long Arm
K8-320-015	5" x 20" (12.5x50)	5 EA x BOX	Short Leg
K8-321-015	5" x 30" (12.5x76)	5 EA x BOX	Short Leg
K8-324-015	5" x 45" (12.5x115)	5 EA x BOX	Long Leg
K8-326-015	6" x 45" (15x115)	5 EA x BOX	Long Leg

CODE NO.	SIZE (cm x cm)	PACKAGE
K8-400-015	ROLL 2" (5x450)	1 Roll
K8-402-015	ROLL 3" (7.5x450)	1 Roll
K8-403-015	ROLL 4" (10x450)	1 Roll
K8-404-015	ROLL 5" (12.5x450)	1 Roll
K8-405-015	ROLL 6" (15x450)	1 Roll

## مزایای آتل پلی اورتان Pp-splint

۱. استحکام بالا نسبت به آتل های قدیمی در کنار وزن کم و راحتی فرد آسیب دیده
۲. سرعت عمل بالای پزشک در انجام آتل گیری و عدم نیاز به دستکش
۳. جلوگیری از رشد قارچ و آلودگی به علت عدم جذب رطوبت
۴. قابلیت ارائه در سایز رولی جهت استفاده در اتاق های عمل

### Mahan Teb Asre Novin

Unit 20, No 16 , Ramin St. Shams Tabrizi Ave. Mirdamad Blv.  
Tehran - IRAN

Tel: (+98) 21 266 45 281 - 84

www.MahanMedical.com

Fax: (+98) 21 22 27 47 03

Info@MahanMedical.com

# KJC